

○ 质控及染色信息完整溯源



完整的染色运行记录：质控记录（类型、批号、滴加位置、数量等）、玻片信息（病例ID、检测靶标）、一抗试剂、染色程序等



具备LIS/HIS传输功能

自动记录图片信息（质控品滴加位置、数量），直观溯源



玻片架号	病例ID	玻片ID	质控品名称	完成时间		
1-01	切片标签体现质控品信息		CD20+、CD20-	2022-05-30 19:00:03	完成	查看图片
2-01			ALK+、ALK-	2022-05-30 19:02:25	完成	查看图片
3-01			Ki-67+	2022-05-30 19:05:17	完成	查看图片
4-01			Line 10	2022-05-30 19:25:13	完成	查看图片
5-01			Line 16	2022-05-30 19:27:45	完成	查看图片



LYNX480 PLUS

全自动免疫组化染色系统

带质控的免疫组化解决方案

更便捷，更安全，助力实验室推进质量管理体系建设 (ISO15189; CAP/CLIA)

LYNX480 PLUS参数

品牌	LYNX480 PLUS	
模块	染色模块	质控加样模块
仪器形式	分体台式设备	
重量	约135kg	约45kg
体积	1000*825*805 mm	630*350*625 mm
切片上载方式及上载量	48 (4玻片架, 每架12片)	60 (5玻片架, 每架12片)
试剂/质控位数量	44 (试剂位), 可在线冷藏	54 (质控位)
功能	IHC, ISH, 双染	液态细胞质控自动加样
LIS/HIS功能	有	
电源及功率	220V~ 50HZ, 1200VA	220V~ 50HZ, 320VA



Contact US

杭州百凌生物科技有限公司
图凌（杭州）生物医药有限公司

浙江省杭州市滨江区滨安路688号天和高科技园区5号楼1303室

Tel: 0571-88177680

E-mail: sales@biolynx.cn

Web: www.biolynx.cn

全国统一服务热线: 400-8769-741




官方微信

本目录仅供客户学习、交流和研究使用，请勿用于商业用途，违者必究
印刷版本：2022年6月


LYNX480 PLUS全自动免疫组化染色系统

致力于免疫组化自动化和标准化

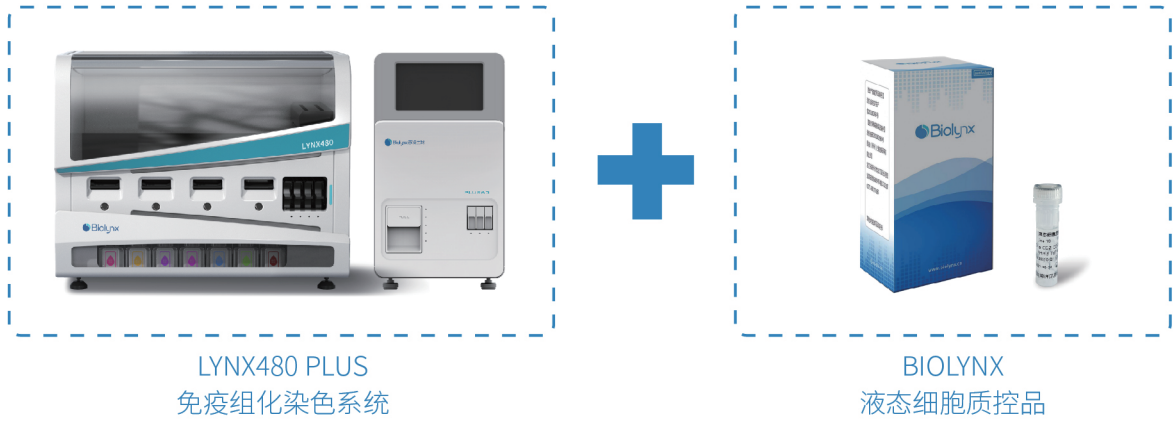

具备质控功能的免疫组化自动化解决方案

LYNX480 PLUS 液态细胞质控加样模块

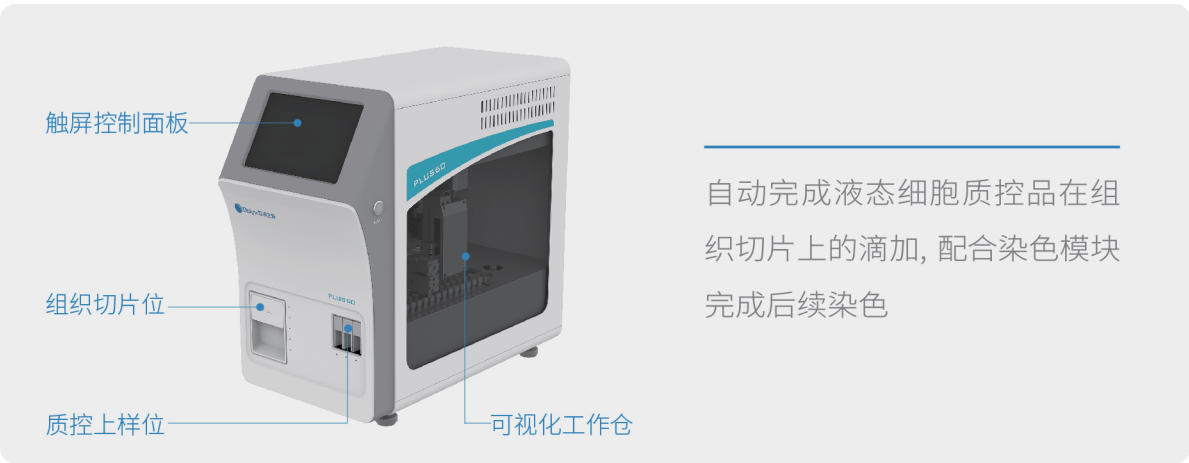

LYNX480 PLUS 系统工作特点

全自动

54个质控试剂位, 可同时为60张组织切片滴加液态细胞质控; 48个组织切片上机染色位

自动完成液态细胞质控滴加过程及从烤片至复染流程


自动扫码识别液态细胞质控品、一抗、显色系统及组织切片标签等信息, 并将对应的多者进行自动匹配



质控方案的灵活设置


内置推荐的标准质控加样方案

根据靶标种类, 系统会自动匹配对应的质控品类型, 及给出推荐的质控加样位置及数量

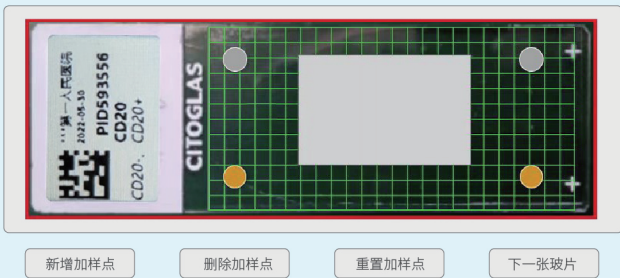

支持客户自定义质控加样方案

用户也可自定义添加阴阳质控的加样位置和数量, 形成个性化质控方案模板并保存供后续应用

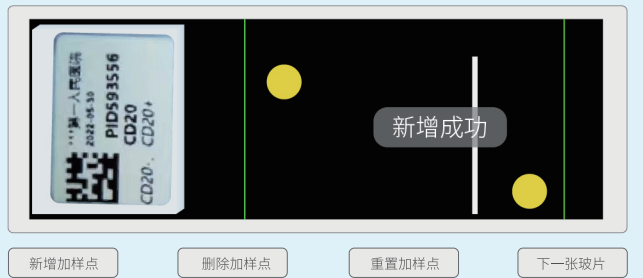

质控信息管理模块

内置液态细胞质控品选项, 支持用户自定义添加质控品信息至病例玻片



质控精准滴加

加样针自动滴加质控, 细胞质控斑大小精准控制 (直径3~5mm)

